


CODIGO G

PROTECTOR FACIAL

KIT ARMABLE

CONSTITUIDO DE UNA PANTALLA PANORÁMICA TRANSPARENTE INTERCAMBIABLE Y UNA VISERA ANATOMICA QUE PROTEGE AL USUARIO DE SALPICADURAS DIRECTAS AL ROSTRO (SALIVA U OTROS FLUIDOS) Y EVITA EL CONTACTO DIRECTO DE LAS MANOS CON EL ROSTRO (BOCA, NARIZ Y OJOS).

VISERA

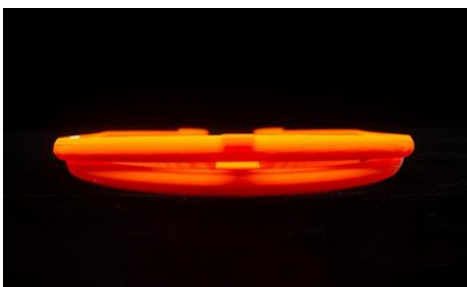

- Practico sujetador de lámina.
- Adaptado a la anatomía de la cabeza.
- Liviano, cómodo de llevar
- Manufactura aditiva a través del proceso FDM (impresión 3D)
- Material termoplástico PLA.
- Biodegradable, reciclable, incinerable

PANTALLA PANORAMICA



- Pantalla transparente en lamina cristal PET
- Diseño envolvente; suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón contra salpicaduras de fluidos pulverizados por estornudos, tos, conversación u otros.
- Su profundidad permite el uso de gafas correctoras y mascarilla de seguridad.
- Espesor: 0.2mm / 200 micras

HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL

- De fácil desinfección con lejía y alcohol (concentraciones según recomendación sanitaria).
- Resiste esterilización química con óxido de etileno y radiación gamma.
- No exponer a temperaturas altas (40 C) puede sufrir deflexiones
- Reciclable
- Disposición Final: Puede ser incinerado (Libre de halógenos)

¡ALERTA! NO EXPONER A MAS DE 40 C RIESGO DE DEFORMAR EL EQUIPO

CODIGO G E.I.R.L RUC 20604084327


Dirección: Aguada Blanca 133, Dpto. 101, Lima /Surco/Urb. Chacarilla Telf.: 987971731

www.studiocodigog.com info@studiocodigog.com






INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA PANTALLA

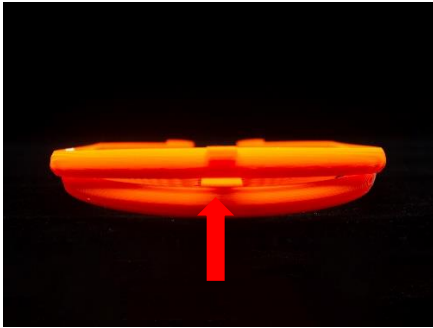


PASO 01

- Levantar el mecanismo de ajuste presionando hacia arriba en el botón de apoyo existente en la visera ;
- En el centro de la apertura se debe colocar un extremo de la lamina transparente tal como se muestra en la figura.

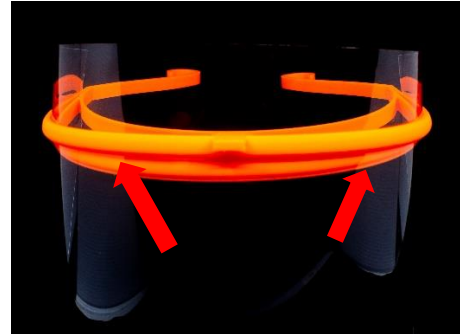

PASO 02

- Deslizar la lamina transparente hacia un extremo de la visera, terminando de insertar todo el borde superior de la lamina en la apertura.

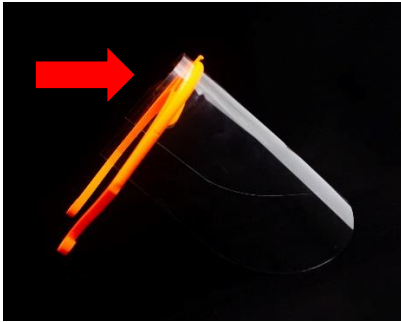

PASO 03

- Ajustar horizontalmente el margen superior de la lamina que queda en cima de la visera (1 a 2 cm) ;
- Cerrar el mecanismo de ajuste presionando hacia abajo en el botón de apoyo de la visera.



PASO 04

- Postura final en la cabeza del usuario.

CODIGO G E.I.R.L RUC 20604084327

Dirección: Aguada Blanca 133, Dpto. 101, Lima /Surco/Urb. Chacarilla Telf.: 987971731

www.studiocodigog.com info@studiocodigog.com

